



# Track® Bleach

Термоформовочная пленка, для изготовления капп  
для отбеливания.

Tiefziehfolie

Thermoforming foils

Feuilles pour façonnage thermoplastique

Láminas de reproducción termoplástica

Fogli termoformabili



Проверяйте сроки хранения •

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten • please check the use by date  
considérer la date limite de conservation • rispettare la data di scadenza  
considerar la fecha minima de caducidad



Внимательно читайте инструкцию •

Gebrauchsanweisung beachten • see operating instructions  
considérer le mode d'emploi • rispettare le istruzioni per l'uso  
considerar la instrucción de funcionamiento



Для однократного использования •

Nicht zur Wiederverwendung • for single use only • pas à la réutilisation  
non riutilizzabili • no a la reutilización



**<25° C**

Хранение при температуре  
не более 25° C •

Lagerung • storage • stockage  
Conservazione • almacenaje



93/42/EWG



Quality System



Certified by DQS acc.to  
DIN EN ISO 9001 : 2000  
DIN EN ISO 13485 : 2003

Annex II of Directive  
93/42/EEC

Reg. No. 055387

**FORESTADENT®**

GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

**Химические характеристики:**

PEVA: ethyl-vinyl-acetate (этил-винил-ацетат)

Безвредно для здоровья, проверено на биосовместимость.

Растворяется в воде, неактивен, безвредно для грунтовых вод.

**Утилизация / Переработка:**

Бытовые отходы (с низким содержанием загрязняющих веществ) / общая утилизации пластика.

**Применение:**

Каппы для отбеливания, каппы для ремтерапии (фторирования).

**Свойства материала:**

Гибкий материал, обладающей высокой эластичностью и стабильностью размера.

**Пластификация:**

(для машин без датчика контроля времени разогрева). Разогревайте пленку до тех пор, пока не увидите, что она чуть провисает, далее приступайте к штамповке.

Доступно: Track® Bleach, прозрачный, диаметр 125 мм.

	Толщина	Количество	Номер для заказа	Время разогрева Для MINISTAR® / Biostar®	Код
Track® Bleach	1,0 мм.	100	408-0610	50 сек.	162